



## วิธีเก็บและนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1

### ข้อแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่าง

เจาะเลือดจากหลอดเลือดดำใส่หลอดที่ใส่สารกันเลือดแข็งตัว EDTA (Sodium or Potassium Salt Ethylenediamine tetra acetate) ปริมาณอย่างน้อย 2 มิลลิลิตร ผสมเลือดให้เข้ากันโดยการคว่ำหลอดไปมา เขียนชื่อนามสกุล วันที่เก็บตัวอย่าง บนฉลากติดหลอด ใส่ถุงพลาสติกและบรรจุในกล่อง กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม การส่งตัวอย่างให้ครบถ้วน ชัดเจน

### วิธีการนำส่งตัวอย่าง

นำหลอดเก็บเลือดใส่ในถุงพลาสติกและบรรจุลงในกล่อง (กระดาษหรือโฟม) นำส่งโดยทันทีหรือภายใน 2 ชั่วโมง หรือส่งทางไปรษณีย์ชนิดด่วนพิเศษ ไม่ควรเก็บตัวอย่างไว้นานเกิน 7 วัน ก่อนส่งถึงห้องปฏิบัติการ กรณีไม่สามารถนำส่งตัวอย่างได้ทันที ให้เก็บตัวอย่างที่ 2 - 8 องศาเซลเซียส