

## แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7735 5301-6 โทรสาร 0 7735 5300

## กรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.....เพศ  ชาย  หญิง อายุ.....ปี.....เดือน.....วัน อาชีพ.....  
 ที่อยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....  
 วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มป่วย.....วัน/เดือน/ปี ที่รับไว้.....วัน/เดือน/ปี ที่จำหน่าย.....  
 รับการรักษาที่ ร.พ.....อำเภอ.....จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....HN.....แพทย์ผู้รักษา.....  
 ขณะนี้ตั้งครรภ์.....เดือน ครรภ์ที่.....

- คนปกติ ต้องการทราบระดับภูมิคุ้มกันโรค  
 ผู้สัมผัสโรค ไม่มีอาการป่วย แต่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่อวัน/เดือน/ปี.....  
 ผู้ป่วย วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มป่วย.....เคยสัมผัสโรคเมื่อวัน/เดือน/ปี.....

## อาการ

- ไข้ อุนหภูมิ.....องศาเซลเซียส  ไม่มีไข้  
 ผื่นทั้งตัว  ผื่น ที่บริเวณ (ระบุ).....  
 ลักษณะผื่น  หยาบ  ละเอียด  เป็นตุ่มใส  
 ต่อม้ำเหลืองโต  หลังหู  หลังศีรษะ  2 ข้าง  ข้างเดียว  
 อาการอื่นๆ ระบุ .....
- ผู้ป่วยเด็กติดโรคหัดเยอรมันในครรภ์มารดา (Rubella Syndrome Baby)  
 น้ำหนักตัวน้อย  หัวใจพิการ  หูหนวก  
 ตาเป็นต้อข้างเดียว  ตาเป็นต้อ 2 ข้าง  ตับโต  
 ม้ามโต  ตัวเหลือง  ผื่นที่ผิวหนัง  
 อาการอื่นๆ ระบุ.....  
 มารดาของผู้ป่วยมีประวัติออกผื่นขณะตั้งครรภ์.....เดือน

## การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

- เพื่อแยกเชื้อ : Throat swab วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง...../...../.....  
 เพื่อตรวจหาแอนติบอดี :  พลาสมา  ซีรัม วัน/เดือน/ปี ที่เจาะเลือดครั้งแรก ...../...../.....  
 วัน/เดือน/ปี ที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 ...../...../.....

วัน/เดือน/ปี ที่ส่งตัวอย่าง ...../...../.....

ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งตัวอย่าง ชื่อ..... ที่อยู่..... โทรศัพท์.....	ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ต้องการทราบผล ชื่อ..... ที่อยู่..... โทรศัพท์.....
---	--

**☞ วิธีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน**

1. เจาะเลือดเพียงครั้งเดียวหลังจากออกผื่น 4 วันแต่ไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากพบผื่น
2. ตัวอย่างเซรัม ปริมาณ 2 – 3 มิลลิตร ในหลอดพลาสติก ปิดสนิท ติดฉลากรายละเอียดชื่อผู้ป่วย  
โรงพยาบาล วันที่เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน แช่เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส กรอกรายละเอียดในแบบส่ง  
ตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน ให้ครบถ้วนและชัดเจน
3. นำหลอดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกซีลล็อก บรรจุในกระป๋องแข็งแรง ใส่ในลังโฟมพร้อมน้ำแข็งหรือ ice pack  
รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที
4. หากไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ทันทีควรเก็บรักษาซีรัมไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 วัน  
หากนานกว่านั้นควรเก็บไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส
5. ส่งพร้อมกับใบนำส่งตัวอย่างไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  
(หลีกเลี่ยงตัวอย่าง hemolysis มีไขมันหรือมีการปนเปื้อน)

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจนทุกครั้งที่ส่งตัวอย่างตรวจ